



Anleitung zur Handhabung der Evakuierungsdecken

1. Legen Sie die Evakuierungsdecke so auf den Lattenrost, dass die orange farbigen Gurte zu sehen sind. Dann legen Sie die Matratze auf die Decke.
2. Führen Sie die 4 Eckspanngummis jeweils über die 4 Ecken der Matratze.
3. Danach können sie die Matratze, wie gewohnt, mit einem Bettlaken oder einem Spannbettuch beziehen.
4. Achten sie bitte unbedingt darauf, dass die Enden der Fixierungsurte (weiße Klettverschlüsse) jeweils nach außen zeigen, damit diese in einem Notfall auch nach außen herausgezogen werden können. Bitte bei jedem Betten machen kurz unter die Matratze schauen und bei Bedarf korrigieren.

In einem Notfall

1. Betreten sie den Raum und informieren sie den/die Senioren/in kurz über ihr Vorhaben.
Beispiel: „ Guten Abend Frau Müller. Wir haben einen Notfall und ich muss Sie aus dem Bett bringen“.
2. Danach versuchen sie, die Arme des/der Senioren/in unter die Bettdecke zu legen. Sollte das nicht möglich sein, verzichten sie darauf.
3. Jetzt ziehen sie jeweils an den Klettverschluss-Bändern, die an den Längsseiten der Matratze in Höhe der Brust und der Oberschenkel angebracht sind und fixieren die Person hiermit.
4. Treten sie nun an das Fußende der Matratze. Heben sie die Matratze ein wenig an und ergreifen die orange farbigen Zuggurte mit beiden Händen.
5. Ziehen sie die Matratze ein wenig zu sich heran. Das erleichtert das Drehen der Matratze auf dem Lattenrost.
6. Drehen sie die Matratze in einem 90° Winkel zur Bettkante und ziehen die Person mitsamt der Matratze zügig vom Bett herunter.
7. Wenn sie die Person aus dem Bett gezogen haben, stellen sie sich möglichst gerade hin, um beim Weiterziehen nicht „aus dem Rücken“ zu ziehen.
8. Ziehen sie nun die zu rettende Person z.B. in den nächsten Brandabschnitt.